

カンタン操作で
時間と温度を楽々設定。
安心と信頼のベストパートナー！

卓上小型高圧蒸気滅菌器

医療

HF220/260

- 送風ポンプ内蔵でいつでも最適な乾燥
- スタートから終了までをデジタル表示
- 前回の設定状態をオートキープ

簡単で
使いやすい
卓上タイプ



HF220

HF260は操作パネルと扉部分の色合いが異なります。

用途にあわせたワンタッチ切り替え操作 前回の設定をそのままキープ

送風タイプで
ベストな乾燥

作業手順



1. 準備

電源スイッチを「入」にします。被滅菌物を入れワンタッチドアを閉めます。

POINT スライド式のドアロックが確実にドアをロック。

2. 滅菌

滅菌温度を自由にセレクト。お好みで滅菌時間も設定できます。

POINT 温度切り替え（121℃：20分/132℃：5分の標準設定）は、キーを押すだけで、常に最良の滅菌状態が得られます。

3. 乾燥

乾燥時間を自由に設定できます。（20～30分 標準設定）

POINT 送風ポンプ式乾燥で最適な乾燥が得られます。

4. 完了

終了音が鳴りましたら、圧力計の針が「0」であることを確認してドアを開け被滅菌物を取り出します。

POINT 前回の設定をキープしていますので、同じ設定の場合でも再度設定をする必要はありません。

作業行程は全てデジタル表示されます。スタートから終了まで、確認しながら安心して使用できます。

オプション



ステンレス製角型金網カゴ
W270×D180×H75 mm (内寸法)
¥14,000 (税込 ¥15,400)
W280×D200×H75 mm (内寸法)
¥15,000 (税込 ¥16,500)



ステンレス製角型キャスト HF用
W310×D160×H60 mm (外寸法)
¥26,000 (税込 ¥28,600)
W310×D160×H130 mm (外寸法)
¥28,000 (税込 ¥30,800)



丸キャスト
小：φ170×H120 mm (内寸法)
¥9,500 (税込 ¥10,450)
中：φ200×H150 mm (内寸法)
¥12,500 (税込 ¥13,750)

規格・仕様

型 式	卓上小型高圧蒸気滅菌器	
	HF220	HF260
医療/理化学機器分類	医療	
外寸法	W430×D453×H367 mm	W490×D492×H397 mm
重 量 (約)	27 kg	35 kg
缶体寸法	φ220×有効寸法330 mm	φ260×有効寸法350 mm
有効容量	12.5L	18.8L
収容力	丸キャスト小×2ケ (HF220)、丸キャスト中×2ケ (HF260) 角型キャスト H60 mm×2ケ/H130 mm×1ケ	
操作方法	ワンタッチ全自動 (前回使用設定を保持)	
滅菌温度	121℃ (20分～90分：変更可) / 132℃ (5分～90分：変更可)	
温度制御	マイコン・サーミスタ方式	
乾燥方式	乾燥ヒーター+送風乾燥式、(90分まで可変可)	
表示方法	デジタル方式	
安全装置	空焚防止装置・安全弁・圧力安全スイッチ・ 過電流保護ブレーカー・過昇防止装置	
電源(50/60Hz)/最大発熱量	単相AC100V 14.4A 1.44kW / 1,238kcal/hr	
電源接続部形状	アース付 3P 15Aを使用ください	
主な付属品	スノコ板1枚・排水フィルター1個・ナイロンタワシ1個	
医療機器の種類別	管理医療機器 (クラスⅡ) 特定保守管理医療機器	
医療機器製造販売承認番号	21900BZX00242000	21900BZX00243000
価 格	¥500,000 (税込 ¥550,000)	¥535,000 (税込 ¥588,500)

*外寸法はドアノブの奥行36mmは含まず、ゴム足の高さ27mmを含みます。*電源コードの長さ28m

医療：薬機法に基づく医療機器

*価格、仕様、外観などは予告なく変更する場合があります。

代理店

株式会社 平山製作所

<https://www.hirayama-hmc.co.jp/>

本 社 〒344-0014 埼玉県春日部市豊野町2-6-5 TEL. 048-735-1241 FAX. 048-733-2384
大 阪 支 店 〒530-0043 大阪市北区天満4-9-1 TEL. 06-4800-0025 FAX. 06-4800-0062
仙 台 事 務 所 〒983-0833 仙台市宮城野区東仙台2-12-43-101 TEL. 022-296-3677 FAX. 022-296-3688
福 岡 事 務 所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵4-5-7 (ヤガミ福岡ビル) TEL. 092-433-3031 FAX. 092-471-6870
サ ー ビ ス セ ン タ ー 〒344-0014 埼玉県春日部市豊野町2-6-5 TEL. 048-735-1222 FAX. 048-733-2384

●サービス拠点 札幌、青森、大阪



ISO 13485 認証取得
本社 / サービス / 工場
tuv-sud.com

J22.07.10HIR