

カンタン操作で時間と温度を  
ラクラク設定  
安心と信頼のベストパートナー

卓上小型高圧蒸気滅菌器

管医Ⅱ

# HF220/260

- 送風ポンプ内蔵でいつでもベストな乾燥
- スタートから終了までをデジタル表示
- 前回の設定状態をオートキープ

さらに  
使いやすく  
新登場



HF220

HF260は操作パネルと扉部分の色合いがHF220と比べ一部異なります。

# 用途にあわせたワンタッチ切り替え操作 前回の設定をそのままキープ

送風タイプで  
ベストな乾燥

## 作業手順



**【各部名称】**

- 圧力計
- デジタル表示
- プロセスモニター
- 減菌温度切換キー
- 操作設定キー
- 時間設定キー
  - ▲タイムアップ
  - 減菌・乾燥セレクト
  - ▼タイムダウン
- スタート・ストップキー
- 電源

### 1. 準備

電源スイッチを「入」にします。被滅菌物を入れ、ワンタッチドアを閉めます。

**POINT**▶ スライド式のドアロックが確実にドアをロック。

### 2. 滅菌

滅菌温度を自由にセレクト。お好みで滅菌時間も設定できます。

**POINT**▶ 温度切り替え(121℃：20分/132℃：5分の標準設定)はキーを押すだけで、常に最良の滅菌状態が得られます。

### 3. 乾燥

乾燥時間を自由に設定できます。(20～30分の標準設定)

**POINT**▶ 送風ポンプ式乾燥で最適な乾燥が得られます。

### 4. 完了

終了音が鳴りましたら、圧力計の針が「0」であることを確認してドアを開け被滅菌物を取り出します。

**POINT**▶ 前回の設定をキープしていますので、同じ設定の場合、再度設定をする必要はありません。

作業行程は全てデジタル表示されます。スタートから終了まで、確認しながら安心して使用できます。

## オプション



ステンレス製角型金網カゴ  
W270×D180×H75 mm (内寸法)  
¥14,000  
W280×D200×H75 mm (内寸法)  
¥15,000



ステンレス製角型キャスト HF用  
W310×D160×H60 mm (外寸法)  
¥26,000  
W310×D160×H130 mm (外寸法)  
¥28,000



丸キャスト  
小：φ170×H120 mm (内寸法)  
¥9,500  
中：φ200×H150 mm (内寸法)  
¥12,500

## 管医Ⅱ 医療機器

型 式	HF220	HF260
外 寸 法	W430×D453×H367 mm	W490×D492×H397 mm
重 量 (約)	27kg	35kg
缶体有効寸法	φ220×有効寸法330mm (有効12.5ℓ)	φ260×有効寸法350mm (有効18.8ℓ)
収 容 力	丸キャスト小×2ケ(HF220)、丸キャスト中×2ケ(HF260) 角型キャスト H60mm×2ケ/H130mm×1ケ	
操 作 方 法	ワンタッチ全自動(前回使用設定を保持)	
滅 菌 温 度	121℃(20分～90分：変更可) / 132℃切換(5分～90分：変更可)	
温 度 制 御	マイコン・サーミスタ方式	
乾 燥 方 式	乾燥ヒーター十送風乾燥式、(90分まで可変可)	
表 示 方 法	デジタル方式	
安 全 装 置	空焚防止装置・安全弁・圧力安全スイッチ・過電流保護ブレーカー・過昇防止装置	
電 源 / 消 費 電 力	AC100V 50/60Hz 1.44kW	
付 属 品	スノコ板1枚・排水フィルター1個・ナイロンタワシ1個	
電 源 接 続 部 形 状	アース付 3P 15Aを使用ください	
医 療 機 器 の 種 別	管理医療機器(クラスⅡ) 特定保守管理医療機器	
医 療 機 器 製 造 販 売 認 許 号	21900BZX00242000	21900BZX00243000
価 格	¥475,000	¥510,000

※外寸法はドアノブの奥行36mm含まず、ゴム足の高さ27mm含まれます。※電源コードの長さ2.8m

## 管医Ⅱ：薬機法に基づく医療機器

●表示価格は全て税別価格となります。●仕様及び外観は、改良のため変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

代理店

ISO 13485 認証取得

株式会社 平山製作所



本 社 〒344-0014 埼玉県春日部市豊野町2-6-5 TEL. 048-735-1241 FAX. 048-733-2384  
大 阪 支 店 〒530-0043 大阪市北区天満4-9-1 TEL. 06-4800-0025 FAX. 06-4800-0062  
仙 台 事 務 所 〒983-0833 仙台市宮城野区東仙台2-12-43-101 TEL. 022-296-3677 FAX. 022-296-3688  
福 岡 事 務 所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵4-5-7 (ヤガミ福岡ビル) TEL. 092-433-3031 FAX. 092-471-6870  
サ ー ビ ス セ ン タ ー 〒344-0014 埼玉県春日部市豊野町2-6-5 TEL. 048-735-1222 FAX. 048-733-2384  
ホ ー ム ペ ー ジ ア ド レ ス http://www.hirayama-hmc.co.jp/

●サービス拠点 札幌、青森、大阪、広島

G19.07.50HIR