

雑菌の混入を防いで滅菌・乾燥 高性能真空ポンプを搭載した オートクレーブ

全自動乾燥装置付ハイクレーブ

管医II

HVP-50N



滅菌終了後にフタを閉めたまま乾燥運転。
雑菌の混入をゆるさずに
クリーンな滅菌・乾燥ができます。



ISO 13485 認証取得

このカタログの製品は
ISO13485の認証を受けた
会社で製造した製品です。

全自動乾燥装置付ハイクレーブ HVP-50N

布類の滅菌から器具滅菌、液体滅菌、追加乾燥など用途に合わせた滅菌コースが選べます。

■安心な滅菌処理を支える機能



雑菌の混入をゆるさないクリーンな乾燥

真空ポンプおよび除菌フィルターにより滅菌終了後、フタを閉めたまま乾燥運転します。雑菌混入の心配がないクリーンな乾燥ができます。



真空ポンプでプレバキューム

真空ポンプによって、空気が抜けにくい容器や袋の残留空気を真空脱気（プレバキューム）することができます。

排気レベルが選択可能

排気レベルを3段階から選択して自動で微細排気調整が可能です。

■安全性に配慮した独自の機能



エレクトロ・メカニカルロックシステム

ハンドルによるフタ締め付けではなく、軽快なスライドレバーでフタの開閉が簡単確実。しかも内圧式フタパッキンとフタの周囲からスライドしてくる複数のロックピンによる圧力シール方法で安全対策も施しています。



スライドレバー



ダブルインターロックシステム

滅菌中の缶内圧力と温度を検知し、フタをロックします。停電や手動で停止した場合*でもロック状態を維持します。

*停止および手動停止後もインターロック機構は機能しています。

■使いやすさを求めた機能

用途に合わせて選べるコース選択

布類の滅菌から器具滅菌、液体滅菌、追加乾燥など用途に合わせて5コースから選択できます。また、オリジナルの設定変更も可能です。

メモリ機能

コースごとに設定した内容を登録。スイッチひとつでスタートができます

オートカット「OFF」機能

待機中*の余分な電気代をカットし、復帰はスイッチに触れるだけの簡単操作です。 ※30分以上の場合

管医II：医療機器

規格・仕様

全自動乾燥装置付ハイクレーブ HVP-50N	
型式	HVP-50N
医療/理化学機器分類	管医II
缶体内寸法	φ300×D710 mm
有効容量	50ℓ
コース選択	布類滅菌(空気抜2回・乾燥)・布類滅菌(空気抜3回・乾燥)・器具滅菌・液体滅菌・追加乾燥/5メモリー
滅菌温度設定範囲	105～135℃ 可変式
滅菌タイマー	1～250分・残時間表示方式
乾燥タイマー	1～90分・残時間表示方式
排気設定	3パターン(自然冷却含む)
最高使用圧力	0.25MPa
温度計	デジタル表示5～137℃
圧力計	アナログ表示-0.1～0.4MPa
乾燥方式	水封式真空ポンプ及び外加熱
安全警報装置	圧力安全弁・漏電及び過電流ブレーカー・空焚き防止装置 警報表示(空焚き・温度センサー断線・過温・過冷・過圧・フタ異常・開閉レバーロック異常)
外寸法	W540×D630×H1040 mm
重量(約)	80 kg
圧力容器の種類	小型圧力容器
釜体材質	ステンレス(SUS304)
電源	AC100V 20A 2.0kW
必要な電源設備	単相 AC100V (50/60Hz) 20A 以上
電源接続部形状	丸端子 3m
主な付属品	スノコ・排水フレキシブルパイプ・給水ホース・排水ホース・キャスターストップバー(2個)・保証書・取扱説明書・自主検査確認書・小型圧力容器明細書・アンケートハガキ
医療機器認証番号	230AABZX00038000
医療機器の種類	管理医療機器(クラスII)/特定保守管理医療機器
EMC適合表示	JIS C 1806-1:2010
価格(税別)	¥1,250,000

※外寸法：外寸法のD寸法には、フタ開閉スライドレバーは含まれていません。※電源コード：AC100V 15Aを超える製品は、3芯の圧着丸端子付になります。本体専用ブレーカー、または手元開閉器等をご用意して接続してください。コンセントの場合は、形状をお知らせ頂き有償にて適合プラグをご用意致します。※電源設備は、AC100V 30A以上を推奨します。※海拔800m以上(山岳地域等の低気圧状態)及びダラム管(6mm未満)でご使用になる場合は、仕様変更となりますのでご検討の際はご相談ください。※納品・検収費用：製品に関する納品・検収費用は別途料金になります。

システムアップのオプション機器



レコーダー
¥500,000 (各校正費用別)
6打点(6点/10秒)
チャート幅 100mm/センサー 1本付

温度センサー
¥30,000 (各校正費用別)
T型熱電対(品温/雰囲気)

オプション



ステンレス製丸型金網カゴ
φ270×H220mm(内寸法)
¥13,000
φ270×H270mm(内寸法)
¥14,000



ステンレス製滅菌缶
φ270×H220mm(内寸法)
¥22,000
φ270×H270mm(内寸法)
¥23,000



丸型カスト
φ260×H180mm(内寸法)
¥13,000

●表示価格は、全て税別価格になります。●価格、仕様、外観などは、製品改良などによりやむを得ず変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

ISO 13485 認証取得

株式会社 平山製作所

本社 〒344-0014 埼玉県春日部市豊野町2-6-5 TEL. 048-735-1241 FAX. 048-733-2384
大阪支店 〒530-0043 大阪市北区天満4-9-1 TEL. 06-4800-0025 FAX. 06-4800-0062
仙台事務所 〒983-0833 仙台市宮城野区東仙台2-12-43-101 TEL. 022-296-3677 FAX. 022-296-3688
福岡事務所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵4-5-7 (ヤガミ福岡ビル) TEL. 092-433-3031 FAX. 092-471-6870
サービスセンター 〒344-0014 埼玉県春日部市豊野町2-6-5 TEL. 048-735-1222 FAX. 048-733-2384
ホームページアドレス <http://www.hirayama-hmc.co.jp/>

●サービス拠点 札幌、青森、大阪、広島

B19.03.50.HIR

代理店